

# ULTRA-BABY-TEST-PEN

PRUEBA EN UN PASO DE  
GONADOTROPINA CORIÓNICA  
HUMANA EN ORINA

## Ultra-Baby-test-pen

Es una prueba rápida de embarazo, que fácilmente puede realizar usted. La prueba detecta la presencia de la gonadotropina coriónica humana (hCG) que aparece en la orina en una etapa muy temprana del embarazo. Es una prueba in vitro y solo para uso externo.

## ¿COMO FUNCIONA?

La gonadotropina coriónica humana es una hormona, producida por la placenta en desarrollo, poco después de la concepción y secretada en la orina. La prueba de embarazo contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con esta hormona. Cuando la muestra de orina es aplicada en la prueba tipo pluma, por acción capilar la orina recorre la membrana. Cuando la gonadotropina coriónica humana llega a la zona de prueba en la membrana, se formará una línea de color. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo.

Como referencia de control una línea de color aparecerá en la zona de control (C), si la prueba se ha realizado correctamente.

## CONTENIDO

- 1.- Una bolsa que contiene una prueba tipo pluma y un desecante. El desecante es sólo para fines de almacenamiento, y no se utiliza en los procedimientos de prueba.
- 2.- Folleto con instrucciones de uso

## ¿QUÉ MÁS NECESITA?

1. Un contenedor de plástico o vidrio limpio y seco, para coleccionar la orina.
2. Un reloj

## PRECAUCIONES

1. Esta prueba es sólo para uso externo
2. Deseche tras su uso. La prueba tipo pluma no se puede utilizar más de una vez.
3. No utilice la prueba pasada la fecha de caducidad
4. No utilice la prueba si la bolsa está perforada o no está bien sellada.
5. Manténgase fuera del alcance de los niños

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

1. Conserve a una temperatura entre 4 °C a 30 °C en la bolsa sellada hasta la fecha de caducidad.
2. Manténgase alejado de la luz solar directa, la humedad y el calor.
3. NO CONGELE
4. Preferible abra la bolsa poco antes de usar la prueba


## ¿CÓMO HACER LA PRUEBA?

Abra la bolsa sellada, rasgando a lo largo de la muesca. Retire la prueba tipo pluma de la bolsa.

Sostenga el extremo redondo de la tapa con una mano. Use la otra mano para tirar de la tapa de la prueba tipo pluma y exponga el absorbente.

Coloque la punta absorbente hacia abajo en el flujo de orina por 10 segundos o hasta que esté completamente mojada. No orine pasando la marca de la flecha. O colecte su orina en un recipiente limpio y sumerja la mitad de la almohadilla absorbente en la orina por lo menos durante 3 segundos.

Vuelva a tapar el dispositivo y espere a que aparezcan las bandas de color. Los resultados positivos se pueden observar en 1 minuto. Sin embargo, para confirmar los resultados negativos, se requiere de 3 minutos para completar el tiempo de reacción. No lea los resultados después de 5 minutos.

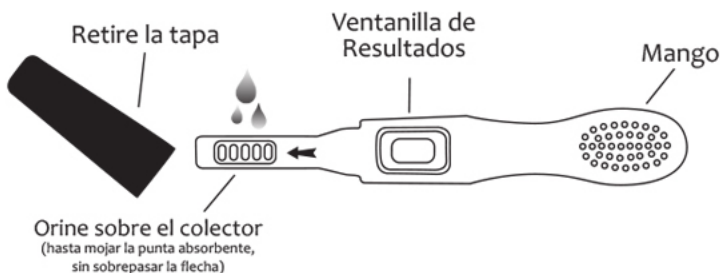

## ¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS?

### RESULTADO NEGATIVO (no embarazada)

Sólo aparece una banda de color, en la zona de control. No aparece banda en la zona de ensayo. Esto indica que el embarazo no ha sido detectado.

### RESULTADO POSITIVO (embarazada)

Visibles bandas de color aparecen en la zona de control y en la zona de prueba. Indica que está embarazada. La intensidad de color de la banda de prueba puede variar con las etapas del embarazo por la presencia de diferentes concentraciones de la hormona de HCG.

### RESULTADO INVÁLIDO

Ninguna banda visible, o hay una banda visible sólo en la región de la prueba, pero no en la zona de control. Repita el procedimiento con una nueva prueba. Si la prueba sigue fallando, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto, con el número de lote.



**NOTA:** si el color en la zona de prueba es débil, se recomienda que la prueba se repita en 48 horas.

## ¿CUÁNDO HACER LA PRUEBA?

Cualquier muestra de orina es apropiada para la prueba de embarazo, pero la primera orina de la mañana es la óptima debido a su mayor concentración de hCG.

## ¿QUÉ HACER CUANDO CONOCE EL RESULTADO?

### SI EL RESULTADO ES POSITIVO (DOS LINEAS)

Consulte a su médico, para confirmar su embarazo, mediante análisis clínicos y pruebas de laboratorio. En ciertas condiciones, la prueba puede dar un resultado positivo falso. Su médico también le dará más información y asesoramiento sobre su embarazo.

Véase también "limitaciones".

### SI EL RESULTADO ES NEGATIVO (UNA LINEA)

Si usted tiene razones para creer que ESTA EMBARAZADA (NO se ha presentado el sangrado menstrual), repita la prueba unos días después, si la prueba sigue siendo negativa, CONSULTE A SU MÉDICO. Véase también "limitaciones".

### RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados negativos son esperados en mujeres sanas, no embarazadas y en hombres sanos. Aunque los niveles de hCG en temprana etapa de embarazo son variables. La prueba en un paso de hCG en orina, es capaz de detectar el embarazo, 1 día después de la espera del período menstrual.

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Hay mucha diferencia entre las líneas de control de dos pruebas. ¿Es esto un problema? No. Las variaciones en el color de la banda de control no afectarán el resultado de la prueba.

2. ¿Los resultados se pueden interpretar después de más de cinco minutos? Los resultados de la prueba NO deben ser leídos después de 5 minutos. Aunque un resultado positivo no debe cambiar durante varios días, un resultado negativo puede cambiar a un falso positivo en cuestión de minutos después del final del período de prueba, cosa que no sería una lectura precisa. Siempre es mejor leer los resultados en el periodo de prueba de 5 minutos y luego descarta la prueba para evitar confusiones.

3. Un fondo de color rosa y rayas verticales aparecieron en el área de resultados durante el período de prueba. ¿Es esto un problema? No. Cada muestra de orina puede variar en su composición química, así como la humedad del aire en la cámara de prueba (habitación). Tales variaciones en las condiciones físicas pueden causar el rayado vertical y/o un fondo de color rosa, pero esto no afectará a los resultados de la prueba. Mientras la banda de control aparezca dentro de los cinco minutos, la prueba está funcionando adecuadamente.

## LIMITACIONES


1. Como sucede con cualquier procedimiento de diagnóstico, un diagnóstico confirmado del embarazo sólo debe ser realizado por el médico después de evaluar todos los datos de laboratorio.
2. Si una muestra de orina está demasiado diluida (baja densidad) es posible que no contenga un nivel representativo de hCG. Si se sigue sospechando de embarazo, realizar otra prueba 48 horas después, con una nueva muestra de orina.
3. Una baja concentración de hCG en un embarazo temprano puede dar un resultado negativo. En este caso, realizar otra prueba 48 horas después, con una nueva muestra de orina.
4. A veces los niveles elevados de hCG pueden ser causados por algunas condiciones distintas de embarazo. Por lo tanto, en estos casos la presencia de hCG en una muestra de orina no debe utilizarse para diagnosticar un embarazo a menos que se hayan descartado estas condiciones.
5. Un embarazo normal no se puede distinguir de un embarazo ectópico sobre la base de los niveles de hCG por sí solos. También el aborto involuntario espontáneo puede causar confusión en la interpretación de los resultados.
6. Tratamientos de esterilidad, a partir de hCG, pueden causar resultados falsos. Consulte a su médico.

**Registro Sanitario No. 0239R2015 SSA**

## SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS



**No exponer a la luz solar**

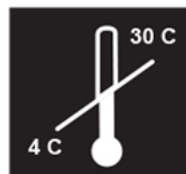

**Conservar entre 4 y 30° C**



**Conservar en lugar seco**



**No reutilizar**